


Accuforce™

Catéter Balón de dilatación para ATCP no complaciente

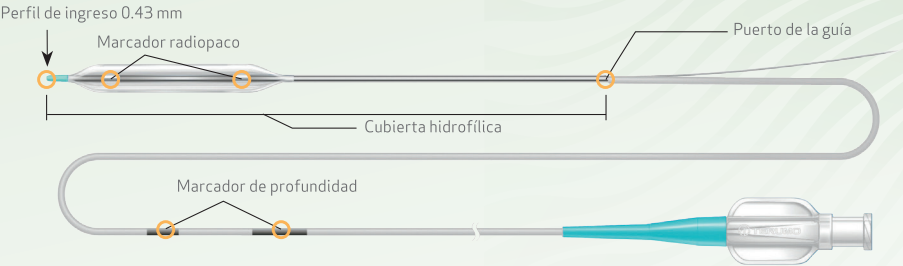

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Diámetro del eje	1.9 Fr / 0.63 mm Proximal 2.5 Fr / 0.84 mm de Medio 2.6 Fr / 0.86 mm Distal
Longitud útil	145 cm
Marcadores de balón N°	2
Presión de Ruptura Nominal	12 atm / 1216 kPa
Presión efectiva de ruptura	22 atm / 2229 kPa (2.0 mm a 4.0 mm) 20 atm / 2026 kPa (4.5 y 5.0 mm)
Compatibilidad de guía	Diámetro máximo 0.014" / 0.36 mm
Perfil de Entrada	0.43 mm
Revestimiento	Hidrófilo

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Longitud del stent/Código del producto							
Diámetro del balón	6	8	12	15	20	25	30
2.00	DC-RM2006H5W	DC-RM2008H5W	DC-RM2012HHW	DC-RM2015HHW	DC-RM2020HHW		
2.25	DC-RM2206H5W	DC-RM2208H5W	DC-RM2212HHW	DC-RM2215HHW	DC-RM2220HHW		
2.50	DC-RM2506H5W	DC-RM2508H5W	DC-RM2512HHW	DC-RM2515HHW	DC-RM2520HHW	DC-RM2525HHW	DC-RM2530HHW
2.75	DC-RM2706H5W	DC-RM2708H5W	DC-RM2712HHW	DC-RM2715HHW	DC-RM2720HHW		
3.00	DC-RM3006H5W	DC-RM3008H5W	DC-RM3012HHW	DC-RM3015HHW	DC-RM3020HHW	DC-RM3025HHW	DC-RM3030HHW
3.25	DC-RM3206H5W	DC-RM3208H5W	DC-RM3212HHW	DC-RM3215HHW	DC-RM3220HHW		
3.50	DC-RM3506H5W	DC-RM3508H5W	DC-RM3512HHW	DC-RM3515HHW	DC-RM3520HHW	DC-RM3525HHW	DC-RM3530HHW
3.75	DC-RM3706H5W	DC-RM3708H5W	DC-RM3712HHW	DC-RM3715HHW	DC-RM3720HHW		
4.00	DC-RM4006H5W	DC-RM4008H5W	DC-RM4012HHW	DC-RM4015HHW	DC-RM4020HHW		
4.50	DC-RM4506H5W	DC-RM4508H5W	DC-RM4512HSW	DC-RM4515HSW			
5.00	DC-RM5006H5W	DC-RM5008H5W	DC-RM5012HSW	DC-RM5015HSW			

CONFORMIDAD DEL BALÓN

Diámetro del balón	Longitud del balón																								
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
2.00	1.58	1.65	1.72	1.79	1.84	1.88	1.92	1.95	1.98	2.00	2.01	2.03	2.04	2.05	2.06	2.08	2.09	2.10	2.12	2.13	2.14	2.15	2.17		
2.25	1.96	2.01	2.06	2.11	2.14	2.16	2.19	2.21	2.23	2.25	2.26	2.28	2.29	2.31	2.32	2.34	2.35	2.36	2.38	2.39	2.41	2.42	2.44		
2.50	2.19	2.24	2.30	2.36	2.38	2.41	2.44	2.46	2.48	2.50	2.52	2.53	2.55	2.56	2.58	2.60	2.61	2.63	2.64	2.66	2.68	2.69	2.71		
2.75	2.43	2.48	2.53	2.59	2.62	2.65	2.67	2.70	2.73	2.75	2.77	2.79	2.80	2.82	2.84	2.86	2.87	2.89	2.91	2.93	2.94	2.96	2.98		
3.00	2.65	2.71	2.76	2.82	2.85	2.89	2.92	2.95	2.97	3.00	3.02	3.04	3.06	3.08	3.10	3.11	3.13	3.15	3.17	3.19	3.21	3.23	3.25		
3.25	2.89	2.95	3.01	3.07	3.10	3.14	3.17	3.20	3.22	3.25	3.27	3.29	3.31	3.33	3.35	3.37	3.39	3.42	3.44	3.46	3.47	3.48	3.51		
3.50	3.13	3.19	3.26	3.32	3.35	3.39	3.42	3.45	3.47	3.50	3.52	3.54	3.57	3.59	3.61	3.63	3.65	3.68	3.70	3.72	3.74	3.74	3.76		
3.75	3.37	3.44	3.50	3.56	3.60	3.63	3.66	3.69	3.72	3.75	3.77	3.80	3.82	3.84	3.86	3.88	3.90	3.92	3.94	3.96	3.98	3.99	4.01		
4.00	3.58	3.65	3.72	3.79	3.83	3.87	3.90	3.94	3.97	4.00	4.03	4.05	4.07	4.09	4.11	4.13	4.15	4.17	4.19	4.21	4.23	4.26	4.28		
4.50	4.02	4.10	4.19	4.28	4.32	4.37	4.40	4.44	4.47	4.50	4.53	4.56	4.59	4.63	4.66	4.68	4.71	4.75	4.78	4.81	4.84	4.87	4.91		
5.00	4.52	4.59	4.67	4.75	4.80	4.85	4.89	4.93	4.96	5.00	5.03	5.07	5.10	5.13	5.16	5.19	5.22	5.26	5.29	5.32	5.35	5.38	5.41		

Presión nominal Presión Nominal de Ruptura



Terumo Corporation
2-44-1 Hatagaya
Shibuya-ku Tokyo 151-0072
Japan
Tel.: +81 3 3374 8111
www.terumo.com

Terumo Medical Corporation
Corporate Office
265 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873 USA
Tel.: +1 732.302.4900
www.terumomedical.com

Terumo Latin America Corporation
Doral Corporate Center I, 6th Floor
8750 NW 36th Street, Miami FL 33178
U.S.A.
Tel.: +1-305-477-4822
www.terumolatinamerica.com


Terumo Interventional Systems
www.terumo.is.com

Terumo Medical de Mexico S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647, Piso 11,
Col. San José Insurgentes Del. Benito Juárez,
C.P. 03900 Ciudad de México, México
Tel.: +52 55 1085 0770
www.terumomexico.com

Aviso de Publicidad No. 213300202C4540
Registro Sanitario No. 0852C2016 SSA
Exclusivo para Profesional de la Salud




La experiencia de Pre y Post-dilatación sin compromiso.

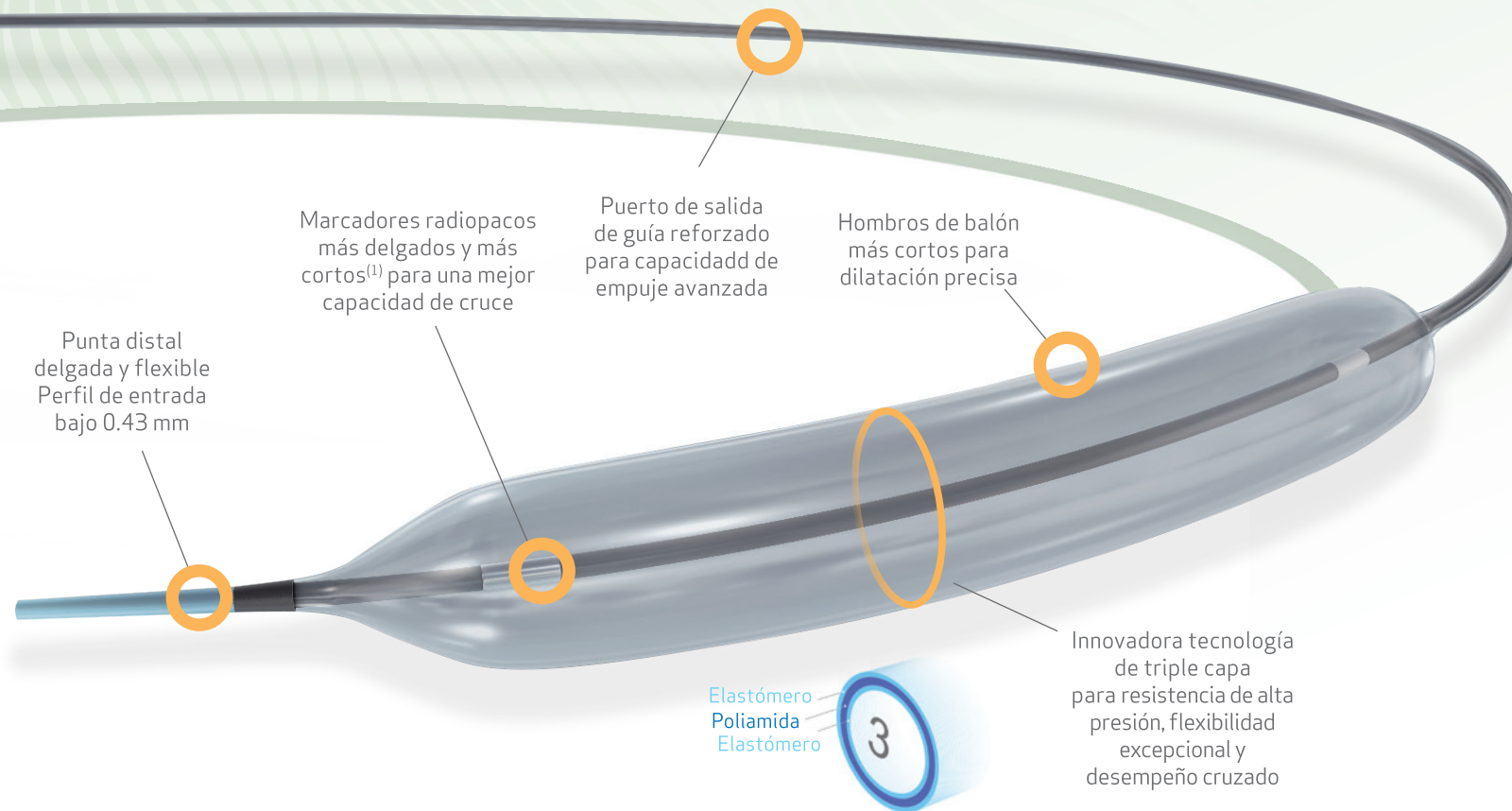

PROPORCIONA IMPRESIONANTE RESISTENCIA A ALTA PRESIÓN HASTA 22 ATM

La innovadora tecnología de triple capa de Accuforce consiste en:

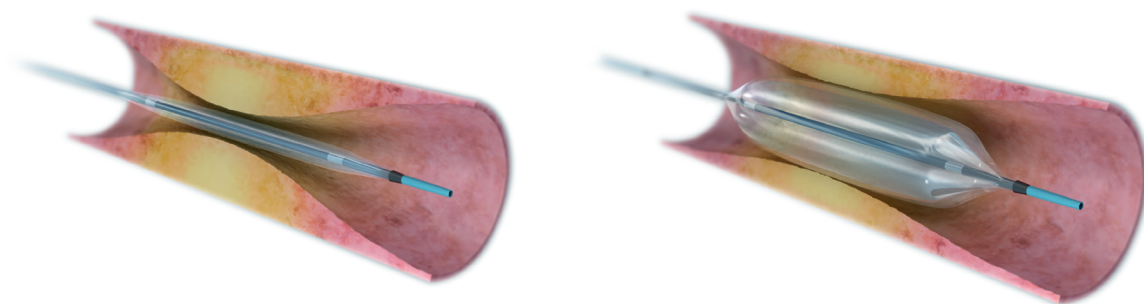

Las capas de elastómero blandas internas/externas ofrecen resistencia a la alta presión desde el interior y contra daños en el exterior.

Capa central más fuerte de poliamida, que proporciona una resistencia adicional y más segura⁽¹⁾ a alta presión requerida para las lesiones calcificadas severas.


(1) Comparación con Hiryu. Catéter de Balón ACTP no conforme fabricado por Terumo Corporation.
(2) Datos en los archivos de Terumo Corporation. Comparación de conformidad de las pruebas de referencia frente a otros Balones de ACTP importantes. n = 10 para cada grupo, resultados no significativos.

OPTIMIZAR LA (RE) CRUZABILIDAD Y LA ENTREGABILIDAD⁽¹⁾


- El material del balón suave y los marcadores radiopacos de nuevo diseño mejoran la flexibilidad.
- El refuerzo de la estructura de orificio de salida de la guía mejora la durabilidad del eje y fuerza la transmisión desde el eje proximal a la punta distal para la capacidad de empuje avanzada.
- El eje de perfil bajo y el puerto de salida de la guía permiten la técnica de kissing balloon con un catéter guía lumen de 6 Fr.

SEA PRECISO EN PRE Y POSDILATACIÓN


- La capa de elastómero adicional en comparación con una estructura tradicional balón de doble capa proporciona una dilatación de alta presión más segura⁽¹⁾ con bajo nivel de conformidad⁽²⁾.
- Hombros de balón más cortos y redondeados sólo enfocan las lesiones y stent para una dilatación eficaz y centrada que es necesaria para la Técnica de optimización Proximal (POT) en bifurcaciones.

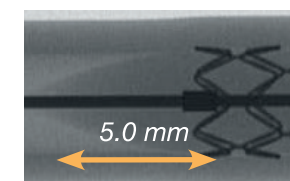

Hiryu

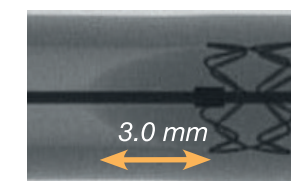

Accuforce

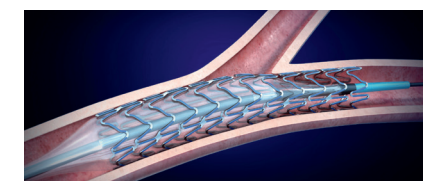

POT con Accuforce

Baja conformidad para la dilatación segura incluso en alta presión⁽²⁾

